

## 取模流程

1. 询问;
2. 耳窥镜查耳 (手势, 坐姿);
3. 放置耳障至耳道第二弯 2-3mm 处;
4. 1:1 混合耳印材料 (注意时间, 需速度);
5. 左手固定耳障绳, 右手注入耳印材料。先里后出, 先慢后快;
6. 等待 5 分钟;
7. 上提耳朵, 释放气压, 缓慢向前旋转取下耳印模, 检查是否合格;
8. 检查耳道是否有残余物, 清洁耳朵;
9. 给耳印放袋放编号&订单。

### 以下情况建议不取:

- A. 耳道有炎症, 流浓;
- B. 中耳炎, 鼓膜穿孔, 耳道手术还未好;
- C. 耳道耳垢堵塞;
- D. 耳道大外小, 或其他, 没把握最好转听力中心。